

LoFric Origo – voor zuigelingen (m)

LoFric® Origo™, hydrofiele urinekatheter voor eenmalig gebruik met zoutoplossing voor activatie.

Voor kort- en langdurend blaasmanagement middels intermitterende katheterisatie via de plasbuis.

LoFric katheters zijn alleen voor gebruik op recept.


Zorg ervoor dat u tijdens het gebruik het advies en de training voor de katheterisatieprocedure van uw zorgverlener opvolgt.

Raadpleeg de in de verpakking bijgeleverde gebruiksaanwijzing voor belangrijke informatie en volledige instructies.

Neem contact op met uw voorschrijver als u problemen ondervindt.

Gebruiksaanwijzing

1. Was uw handen goed met water en zeep.
2. Knijp in het zakje met zoutwateroplossing om het vrij te geven. De katheter is klaar voor gebruik.
3. Trek het openingslabel omlaag om de verpakking te openen en trek de katheter een klein stukje uit de verpakking.
4. OPTIONEEL: Gebruik de kleefstrip op de achterzijde om het product aan een droog en schoon oppervlak te bevestigen.
5. Haal de katheter uit de verpakking.
OPTIONEEL: gebruik de inbrenghulp die over de conus is geplaatst voor een betere controle bij het inbrengen van de katheter, zonder de katheter aan te raken.
6. Beweeg de penis in de richting van de buik. Op deze manier strekt u de plasbuis iets en vormt de plasbuis een letter U. Hierdoor wordt het eenvoudiger om de katheter op te schuiven tot in de blaas.
7. Breng de katheter voorzichtig in. Wanneer de urine begint te stromen, duwt u de katheter iets verder zodat beide katheteroogjes zich in de blaas bevinden.
8. Buig de penis in de richting van de luier of een opvangbekken naar keuze. Wanneer de urine niet meer stroomt, trekt u de katheter een klein stukje terug. Als de urine weer begint te stromen, wacht u met het terugtrekken totdat er geen urine meer uit de katheter komt. Zo bent u er zeker van dat de blaas helemaal leeg is.
9. Richt de penis weer in de richting van zijn buik en verwijder de katheter voorzichtig uit de plasbuis.
10. Plaats de katheter terug in de verpakking en gooi de katheter op de voorgeschreven manier weg (plaatselijke voorschriften kunnen verschillen).

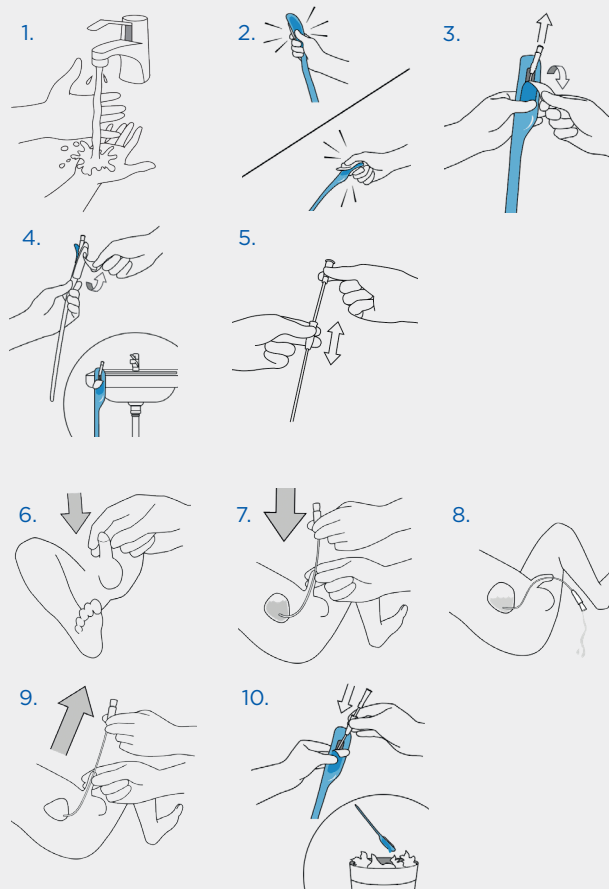

Bij Wellspect ontwikkelen we innovatieve oplossingen voor continentiezorg die de kwaliteit van leven verbetert van mensen met blaas- en darmproblemen. Gebruikers kunnen weer zelfvertrouwen en onafhankelijkheid opbouwen, evenals een goede gezondheid en welzijn ervaren. Al meer dan 40 jaar zijn wij toonaangevend in de sector met onze productmerken LoFric® en Navina™. Wij streven er altijd naar om de impact van onze producten op het milieu tot een minimum te beperken en op termijn klimaatneutraal te worden. Door samen te blijven werken met gebruikers en zorgverleners kunnen we klinische resultaten op een duurzame manier verbeteren, nu en in de toekomst.

Wellspect. **A Real Difference.**

Kijk voor meer informatie over onze producten en diensten op Wellspect.nl.

wellspect.nl

Wellspect BV, Signaalrood 55, 2718 SG, Zoetermeer, Nederland

Tel. NL: +31 79 363 70 10. Fax NL: +31 79 362 37 48. www.wellspect.nl

